

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list



FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNA DUO


Flexibilní zástěna DUO - rozměry

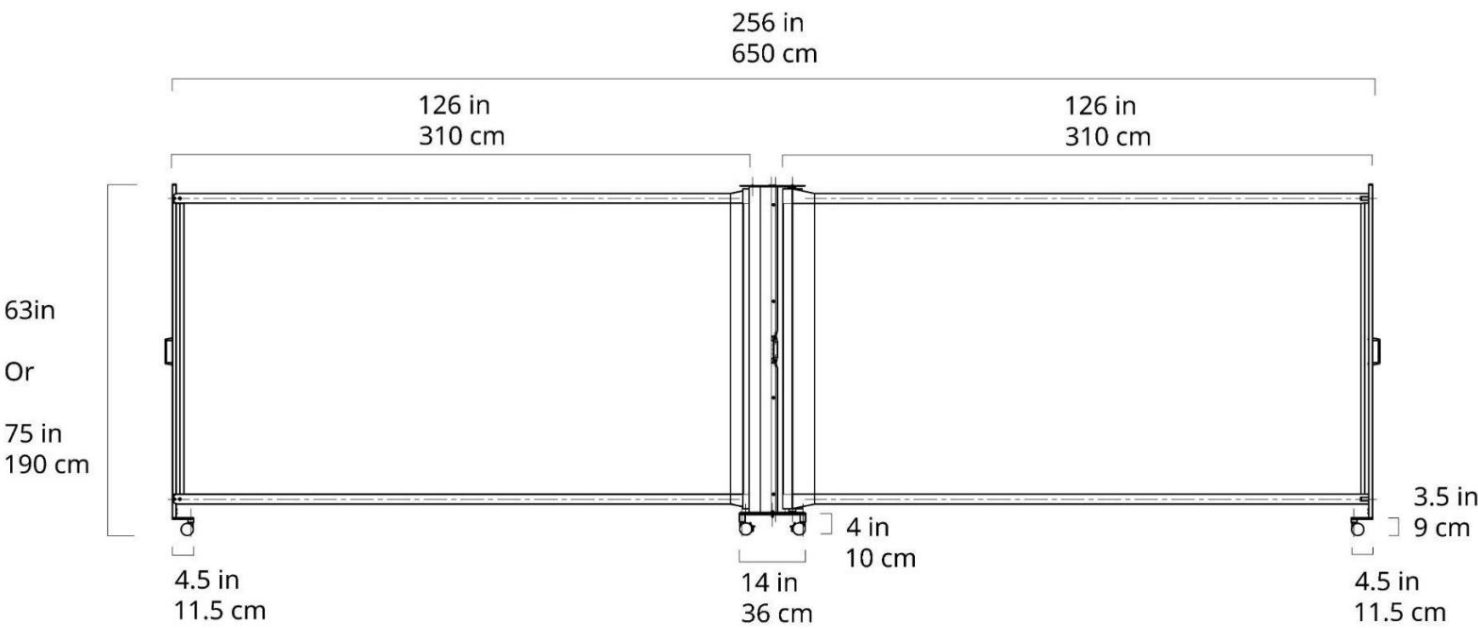

Délka (zatažená)	Délka (vytažená)	Hloubka	Výška
36 cm / 14"	650 cm / 256"	61 cm / 24"	160/190 cm / 63/75"

Rozměry balení - 2 krabice na produkt		
Popis: Privátní přepážka sestávající z ocelového těla, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základní desky a ocelových otočných kolíků.		
Hlavní box – Duo 160 cm vysoký (box 1)	Rozměry 165 x 40 x 26 cm 65" x 16" x 10"	21 kg 46,5 liber
Hlavní box – Duo 190 cm vysoký (box 1)	Rozměry 199 x 40 x 26 cm 79" x 16" x 10"	23,5 kg 52 liber
Duo Base Box (Box 2)	Rozměry 56 x 48 x 9 cm 22" x 20" x 4"	16 kg 35,5 liber

Flexibilní zástěna DUO - podrobnosti o produktu

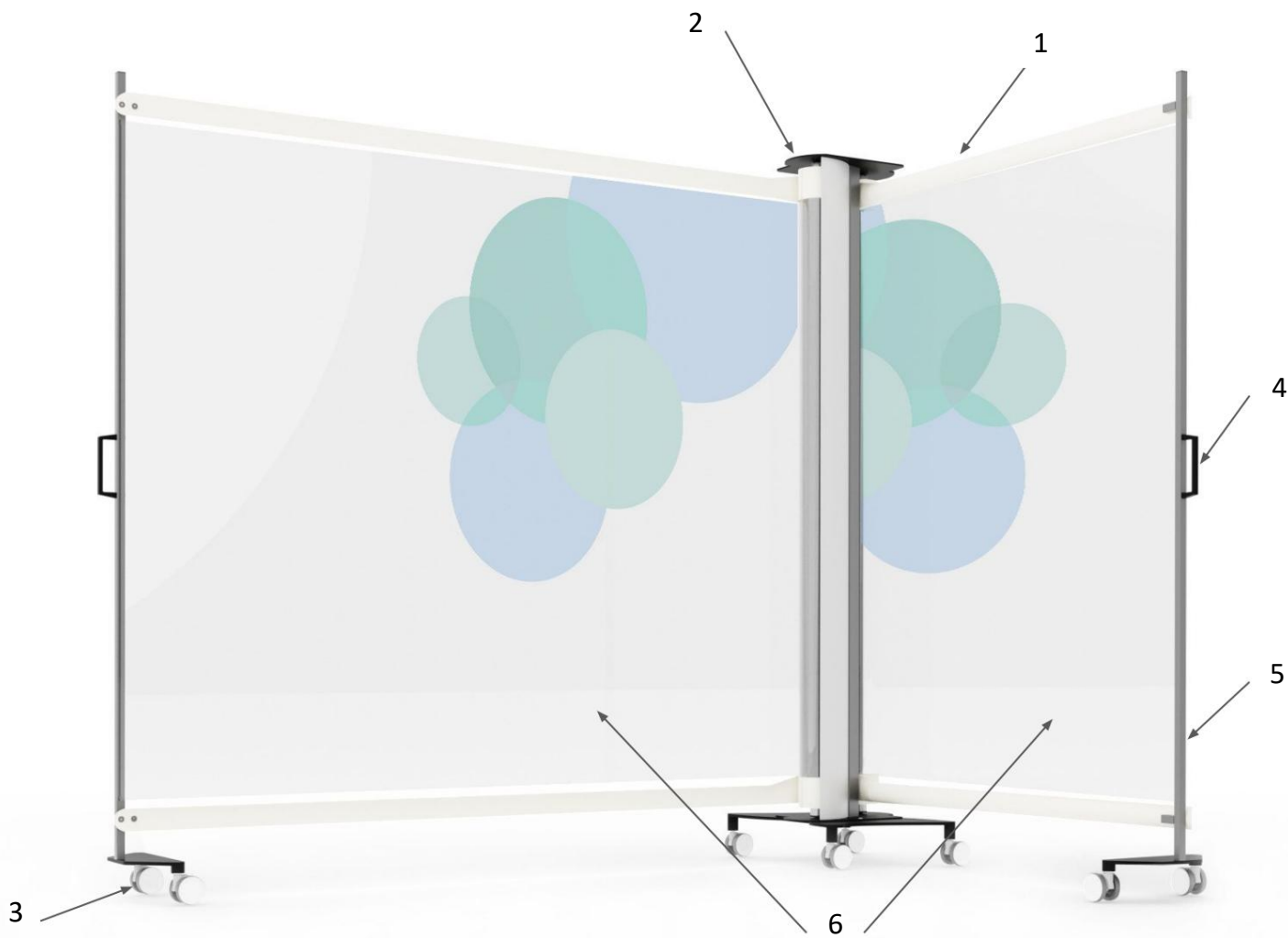

1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Ocelový rám s práškovým nástřikem
3. Kolečka lékařské kvality
4. Hliníkový hřbet
5. Ocelové sloupky, které se uzavírají do hlavního těla
6. Plocha 2 x 3 metry

CLEANLIFE
Inovace | Technologie | Čistota

Čištění flexibilní zástěny

Flexibilní zástěny byly navrženy v souladu s pokyny pro kontrolu infekcí. Všechny zástěny se rychle a snadno čistí pomocí standardních nemocničních čisticích prostředků.



Každodenní úklid

Zástěnu můžete čistit pomocí většiny čisticích prostředků pro zdravotnictví, včetně:

- Kvartérní
- Bělicí roztoky
- Dezinfekční prostředky
- Virucidní dezinfekční prostředky
- Chlornan v 1 000 – 10 000 ppm nebo 60% alkoholový roztok
- UV světlo
- Peroxid vodíku

Odolné skvrny

Pokud běžné čištění neodstraní všechny skvrny, lze při pokojové teplotě použít následující čisticí prostředky:

- Metylbutylalkohol
- Naptha VM&P
- Ethylalkohol
- Isopropylalkohol



Je třeba dávat pozor při použití prostředků na bázi alkoholu.

Hlubkové čištění

Pro hlubkové čištění zcela roztáhněte zástěnu a vyčistěte vnitřek těla. Při čištění nepoužívejte:



Jakékoli ostré nástroje nebo žiletky - mohly by poškrábat povrch.



Tuky nebo oleje.



Vosková leštidla.



Výrobky s abrazivním povrchem, jako je ocelová vlna.

Materiály a záruka

Rozdělení materiálu:

Kompozitní	uPVC (bílý materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevňovací prostředky
	Polyester (průhledný materiál)				
6 %	10 %	60 %	9 %	12 %	2 %

Více než 95 % tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu).

Všechny výrobky splňují mezinárodní požární předpisy
EU a Spojené království: EN13501-1: 2018 – Eurotřída B – s1 – d0
USA: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny zástěny se dodávají s 2letou zárukou výrobce na díly.
Seznam náhradních dílů je k dispozici u výhradního prodejce pro ČR společnosti Pro CleanLife s.r.o.



Tato záruka vylučuje poškození způsobené nesprávným použitím, jako je ohnutí panelu způsobem, k němuž není určen. Další informace vám poskytneme na vyžádání.

Výhradní zastoupení pro ČR:
Pro Cleanlife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha
IČ: 04303342
cleanlife.cz | cleanlife.shop.cz