

Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální zatížení 150 kg / 330 liber.
- Ujistěte se, že je křeslo během přesunu klienta z a na zařízení zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.



- Se židlí Nemo jezděte a manévrujte pouze v nenakloněné poloze.
- Při přemísťování Nemo nenaklánějte.

Operace

Nemo je vybaven funkcí pro naklonění dozadu až o maximálně 30°.

1. Zabrzděte křeslo.
2. Postavte se vedle Nema a uchopte rukojet do pravé ruky (1).
3. Levou rukou držte rám hlavní podpěry (2).
4. Rám křesla lze naklonit stisknutím ovládací rukojeti.




Použití

1. Umístěte židli do správné polohy a otočte opěrky nohou směrem pryč.
2. Zabrzděte židli!
3. V případě potřeby sklopte loketní opěrky nahoru.
4. Podpořte klienta, když si usedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na podnožkách.

Postavení provedete stejným postupem v opačném pořadí.

Blokování kol

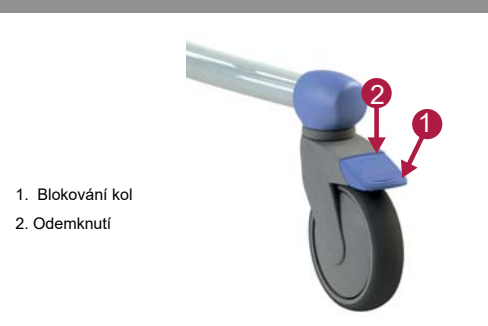

1. Blokování kol
2. Odemknutí

Opěrka nohou



Aby si klient mohl sednout do křesla, musí být obě podnožky sklopené. K tomu je třeba podnožky (1) vyklopit nahoru nebo obě opěrky (2) vyklopit ven. Ujistěte se, že klient má při pohybu obě nohy na podnožkách.

Opěradlo

1. Skládání



Funkce toalety

- Předtím, než si klient do křesla posadí, odstraňte víko ze sedáku.
- V kombinaci s toaletou: Nemo lze přemístit téměř nad každou toaletu.
- S podložní mísou: Nemo lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasunete nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Čištění a údržba

Nemo je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. V případě potřeby lze PUR komponenty dezinfikovat roztokem 70% etanolu nebo propanolu.

Plán údržby a protokol čištění naleznete v návodu k použití.

Podle nařízení MDR (EU) 2017/745 pro zdravotnické prostředky musí být křeslo udržováno v souladu s pokyny výrobce. Tyto pokyny naleznete v protokolu údržby, viz webové stránky Lopital (www.lopital.com).

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.

Důležité!

Tuto stručnou uživatelskou příručku nelze považovat za náhradu za návod k použití!