

Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální zatížení 135 kg.
- Během přesunu klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Umístěte opěrky nohou do správné výšky a položte na ně chodidla.
- Nastavte opěrku hlavy do správné polohy (obvykle naklání).
- Přední zapínání je při zvedání/spouštění zavřené pohyby a paže by měly spočívat na loketní opěrce.
- Křeslo přemísťujte a posouvajte pouze v dolní poloze.

Ovládací panel

Nahoru



Náklon dopředu



Aktivovat



Dolů



Náklon dozadu



Tlačítko zámku



Důležité!

Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.



Použití

1. Aktivujte Reflex současným stisknutím obou tlačítek „nahoru“ po dobu 1 sekundy.
Poznámka: Po použití se Reflex po 60 minutách přepne do režimu spánku.
2. Nastavte židli do správné polohy; upravte také opěrky hlavy a nohou (nebo je složte nahoru).
3. Zabrzděte židli!
4. Otevřete loketní opěrky a v případě potřeby je vyklapte nahoru.
5. Podporujte méně zdatnou osobu, když se účastní sedadla.
6. Zavřete loketní opěrky.


Postavte se provedením stejného postupu v opačném pořadí.

Všechny funkce přístroje Reflex se zastaví stisknutím tlačítka zámku. Přístroj Reflex je nutné resetovat. To provedete stisknutím obou tlačítek „nahoru“ po dobu 4 sekund.

Blokování kol




Opěrka nohou

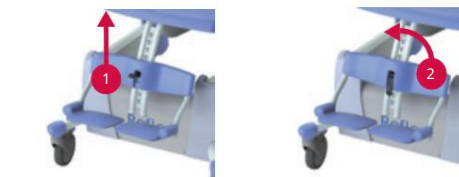

1. Odemčení.
2. Sejměte celou opěrku nohou.
3. Vyberte požadovanou pozici.
4. Zavěste a zajistěte.

Opěrka hlavy

1. Nastavte výšku podpěry.
2. Nastavte hloubku podpory.

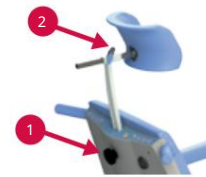

Loketní opěrka s předním zapínáním

1. Odemčení.
2. Otáčení.
3. Skládání.



Nabíjení baterií

Po použití přístroje Reflex jej připojte k nabíječce, aby se baterie udržely v dobrém stavu.



- | | |
|--|-----------------------------|
| Vypnuto | Nastavení spánku. |
| Zelený | Židle připravená k použití. |
| Bliká červeně | Baterie téměř vybitá. |
| Červený | Baterie je prázdná. |
| Reflex nebude během nabíjení fungovat. | |

Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- V kombinaci s toaletou: Reflex lze přesouvat téměř nad každou toaletu. Posuňte křeslo nahoru nebo dolů pro dosažení správné polohy.
- S podložní mísou: Reflex lze použít i jako toaletní křeslo. Jednoduše posuňte nerezovou / plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Nouzové spouštění

Pokud se Reflex porouchá, můžete křeslo spustit dolů pomocí rukojeti pro nouzové spouštění.



Čištění a údržba

Reflex je nutné po každém použití vyčistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kola, zda neobsahují chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte. Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.