



Použití

1. Zabrzděte židli!
2. Otočte opěrky nohou směrem pryč.
3. V případě potřeby sklopte loketní opěrky nahoru.
4. Podepřete méně zdatnou osobu, když si sedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavte se provedením stejného postupu v opačném pořadí.


Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.




Směrové / brzděné kolo

1. Zablokování směru otáčení kola (1x). Blokování kol (2x).
2. Odemčení.

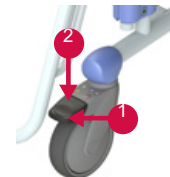

Opěrka nohou

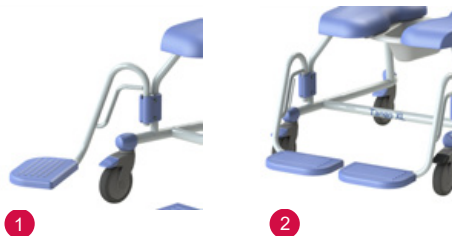

Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit do židle (1), musí být obě podnožky otočeny stranou. Ujistěte se, že osoba má při pohybu židle obě nohy na podnožkách.

Opěradlo

1. Sklopte loketní opěrky.



Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- V kombinaci s toaletou: Tango XL lze přemísťovat téměř nad každou toaletu.
- S podložní mísou: Tango XL lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Čištění a údržba

Kolo Tango XL je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čistící prostředky. Pravidelně kontrolujte kolečka, zda na nich nejsou chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlifeshop.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.

Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální zatížení 250 kg.
- Během přesunu klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.

Důležité!

Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.