


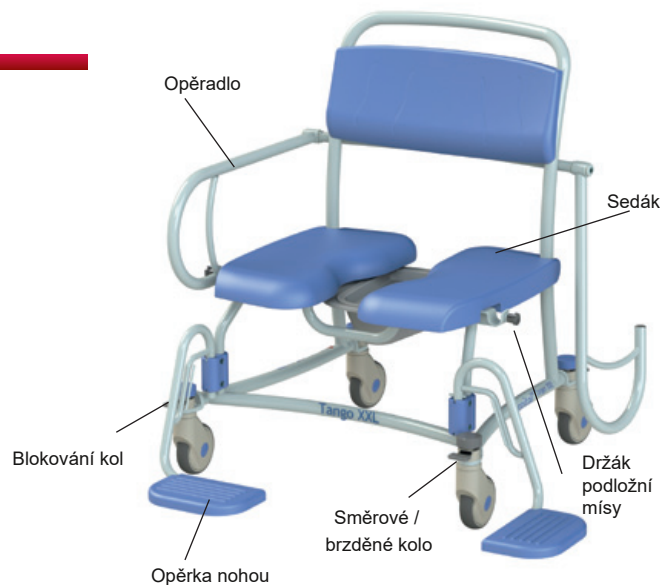

#### Použití

1. Zabrzděte židli!
2. Otočte opěrky nohou směrem pryč.
3. V případě potřeby sklopte loketní opěrky nahoru.
4. Podepřete méně zdatnou osobu, když si sedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavte se provedením stejného postupu v opačném pořadí.


#### Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.



#### Směrové / brzděné kolo

1. Blokování kol.
2. Odemčení.

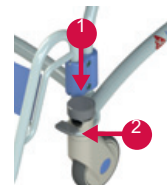

#### Opěrka nohou




Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit na židli, musí být obě podnožky otočeny stranou. Ujistěte se, že osoba má při pohybu židle obě nohy na podnožkách.

#### Opěradlo

1. Odemknutí.
2. Otočení dozadu.

Uzavřete stejným postupem v opačném pořadí.

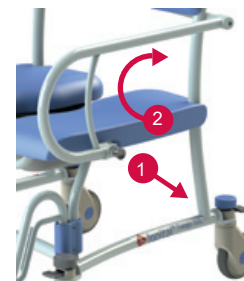

#### Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- V kombinaci s toaletou: Tango XXL lze přemísťovat téměř nad každou toaletu.
- S podložní mísou: Tango XXL lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuněte nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

#### Čištění a údržba

Kolečko Tango XXL je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kolečka, zda na nich nejsou chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.  
Tel: +420 608 837 006, E-mail: [info@cleanlifesop.cz](mailto:info@cleanlifesop.cz)

Návod k použití  
Úplný návod k použití naleznete na [www.cleanlifesop.cz](http://www.cleanlifesop.cz).

#### Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 300 kg.
- Při přesouvání klientů na židli a z ní se ujistěte, že je židle zabrzděna.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.

#### Důležité!

Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za Návod k použití.