




Použití

1. Zabrzdíte židli!
2. Sklopte opěrky nohou nahoru.
3. V případě potřeby sklopte loketní opěrky nahoru.
4. Podepřete méně zdatnou osobu, když si sedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavte se provedením stejného postupu v opačném pořadí.

Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.

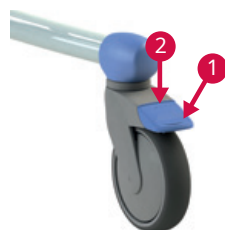

Opěrka nohou



Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit do židle, musí být obě podnožky sklopené. Za tímto účelem sklopte podnožky (1) nebo odklopte obě opěrky nohou (2). Ujistěte se, že osoba má při pohybu židle obě nohy na podnožkách.

Opěradlo



1. Sklopte loketní opěrky.

Funkce toalety

- Než se osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- *V kombinaci s toaletou:* Tango lze přemístit téměř nad každou toaletu.
- *S podložní mísou:* Tango lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Čištění a údržba

Tango je nutné po každém použití vyčistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kola, zda neobsahují chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlifeshop.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.

Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 180 kg.
- Během přesunů klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.

Důležité!
Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.