




Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 220 kg.
- Během přesunu klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslozabzděné.
- Položte obě nohy na opěrku nohou.
- Loketní opěrky jsou při zvedání/spouštění zavřené pohyba pažebymělyspočítatnaloketníopěrce.
- Křeslo přemísťujte a posouvajte pouze v dolní poloze.

Ovládací panel

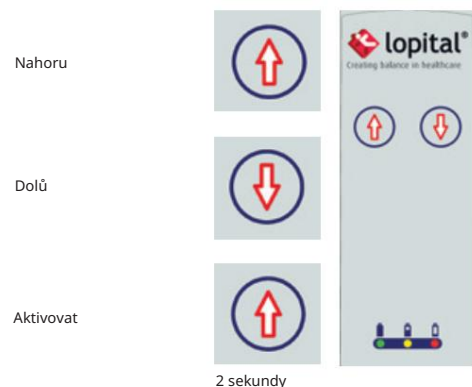

2 sekundy

Důležité!

Tuto instruktažní kartu nelze považovat za náhradu za Návod k použití.

Použití

1. Aktivujte Elexo XXL stisknutím tlačítka „nahoru“ po dobu 2 sekund.
2. Poznámka: Po použití se Elexo XXL po 60 minutách přepne do režimu spánku.
3. Umístěte židli do správné polohy a vyklepte opěrku nohou nahoru.
4. Zabrzděte židli!
5. V případě potřeby sklopte loketní opěrky nahoru.
6. Podporujte méně zdatnou osobu, když se účastní sedadlo.
7. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavení provedete stejným postupem v opačném pořadí.

Blokování kol



Směrové / brzděné kolo

1. Blokování kol.
2. Odemčení.



Opěrka nohou

Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit na židli, musí být obě podnožky otočeny stranou. Ujistěte se, že osoba má při pohybu židle obě nohy na podnožkách.



Opěradlo

1. Odemčení.
 2. Otočte se dozadu.
- Uzavřete opakovaným postupem v opačném pořadí.



Nabíjení baterií

Po použití Elexo XXL připojte k nabíječce, aby se baterie udržely v dobrém stavu.




- | | |
|---|-------------------------------|
| Vypnuto. | Nastavení spánku. |
| Zelená. | Křeslo připraveno k použití. |
| Bliká oranžově. | Nouzové zastavení aktivováno. |
| Oranžová. | Baterie je z poloviny vybitá. |
| Bliká červeně. | Baterie je téměř vybitá. |
| Červená. | Baterie je vybitá. |
| Elexo XXL nebude během nabíjení fungovat. | |

Funkce toalety

- V kombinaci s toaletou: Elexo XXL lze přesouvat téměř nad každou toaletu. Posuňte křeslo nahoru nebo dolů pro dosažení správné polohy.
- S podložní mísou: Elexo XXL lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte podložní mísu z nerezové oceli/plastu pod křeslo pomocí vodiček.

Nouzové spouštění

Pokud se Elexo XXL porouchá, můžete křeslo spustit dolů pomocí tlačítka nouzového spouštění.

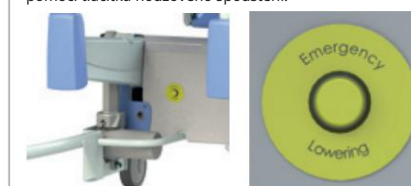

Čištění a údržba

Kolečko Elexo XXL je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čistící prostředky. Pravidelně kontrolujte kolečka, zda neobsahují chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte. Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.