

Bezpečnostní doporučení

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 180 kg.
- Během přesunu klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrku nohou.
- Loketní opěrky jsou během pohybů nahoru/dolů zavřené a paže by měly spočívat na loketní opěrce.
- Křeslo přemísťujte a posouvajte pouze v dolní poloze.

Ovládací panel

Nahoru



Dolů




Aktivovat



2 sekundy

Důležité!

Tuto instruktažní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.

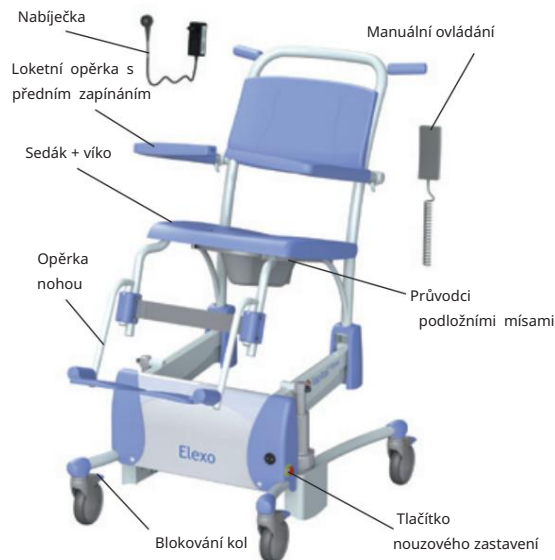

Použití

1. Aktivujte Elexo stisknutím tlačítka „nahoru“ po dobu 2 sekund.

Poznámka: Po použití se Elexo po 60 minutách přepne do režimu spánku.

2. Umístěte židli do správné polohy a vyklepte opěrku nohou nahoru.
3. Zabrzděte židli!
4. Otevřete loketní opěrky a v případě potřeby je vyklepte nahoru.
5. Pomozte méně zdatné osobě, když si sedá.

6. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavení provedete stejným postupem v opačném pořadí.

Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.




Opěrka nohou



Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit na židli, musí být obě podnožky otočeny stranou. Ujistěte se, že osoba má při pohybu židle obě nohy na podnožkách.

Loketní opěrka s předním zapínáním

1. Odemčení.
2. Otáčení.
3. Skládání.

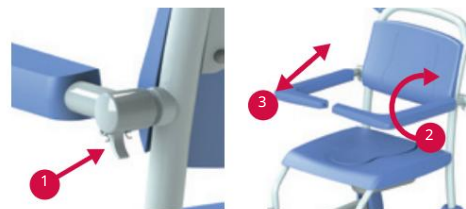

Nabíjení baterií

Po použití Elexo připojte k nabíječce, aby se baterie udržely v dobrém stavu.



Vypnuto.
Zelená.
Bliká oranžově.
Oranžová.
Bliká červeně.
Červená.

Nastavení spánku.
Křeslo připraveno k použití.
Nouzové zastavení aktivováno.
Baterie je z poloviny vybitá.
Baterie je téměř vybitá.
Baterie je vybitá.


Elexo nebude během nabíjení fungovat.

Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- V kombinaci s toaletou: Elexo lze umístit nad téměř všemi toaletami. Posuňte židli nahoru nebo dolů, abyste dosáhli správné polohy.
- S podložní mísou: Elexo lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte podložní mísu z nerezové oceli/plastu pod křeslo pomocí vodiček.

Nouzové spouštění

Pokud se Elexo porouchá, můžete křeslo spustit dolů pomocí tlačítka nouzového spouštění.

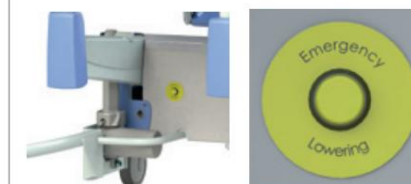

Čištění a údržba

Elexo je nutné po každém použití vyčistit vodou a běžnými čisticími prostředky. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kola, zda neobsahují chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz

Návod k použití

Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.